



Gen1 Giyilebilir Göğüs Pompası

KULLANIM TALİMATLARI

Genİ Giyilebilir Göğüs Pompası

Kullanım Amacı

Genİ Giyilebilir Göğüs Pompası, emziren annelerden sütün sağılarak toplanması ve toplanan sütün bebeğe verilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Giyilebilir Pompa tek bir kullanıcının kullanımına yönelik olarak tasarlanmıştır.

Önemli Tedbirler

Kullanım Öncesinde Tüm Talimatları Okuyun

İlk kullanımdan önce anne sütüyle temas edecek tüm parçaları 2. Bölümde verilen talimatlara uygun şekilde temizleyerek dezenfekte edin. Her kullanımdan önce bileşenleri çatlak, küçük kırık, yırtık, renk değişikliği veya bozulma açısından ayrı ayrı inceleyerek kontrol edin. Cihazda hasar gözlemlenirse lütfen parçalar değiştirilene kadar cihazı kullanmayın.

Uyarı:

Lansinoh® Genİ Giyilebilir Göğüs Pompası, kişisel bakım amaçlı, tek bir kullanıcıya özel bir üründür. Çapraz kontaminasyonu/bulaşmayı önlemek için Giyilebilir Pompa kesinlikle kişiler arasında paylaşılmamalı veya bir kişi tarafından başka bir kişiye satılmamalıdır. Her birey kendi Giyilebilir Pompasını kullanmalıdır. Size Hepatit B, Hepatit C veya İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) bulaşmışsa, Giyilebilir Pompayı kullanarak anne sütü sağmanız, virüsün anne sütü yoluyla bebeğinize geçme riskini azaltmaz veya ortadan kaldırmaz.

Özellikle çocukların bulunduğu ortamlarda elektrikli ürünleri kullanırken, temel güvenlik önlemlerine her zaman uyulmalıdır.

Elektrik çarpması riskini azaltmak için

- Banyo yaparken kullanmayın.
- Bu ürünü düşebileceği veya kuvvet ya da lavabonun içine çekilebileceği bir yere koymayın veya böyle bir yerde saklamayın.
- Suya veya başka bir sıvıya koymayın veya düşürmeyin.
- Suya düşmüş bir elektrikli cihaza kesinlikle uzanarak dokunmayın.
- Bu ürün, pompa çalışırken kesinlikle gözetimsiz bırakılmamalıdır.

Yanık, yangın veya kişilerin yaralanma riskini azaltmak için

- Bu ürün çocukların yakınında kullanıldığında yakın gözetim gereklidir.
- Küçük çocukların veya evcil hayvanların pompa üniteleri, bileşenleri veya şarj kablolarıyla oynamasına izin vermeyin.
- Hamileyken pompayı kullanmayın. Hamilelik sırasında pompanın kullanılması doğumu tetikleyebilir.
- Ürün, yalnızca bu talimatlarda belirtilen amaçlar için kullanılmalıdır. Üretici tarafından önerilmeyen parçaları kullanmayın.
- Cihazı uyurken veya uykuluyken kesinlikle kullanmayın.
- Kesinlikle pompanın herhangi bir girişine herhangi bir cisim düşürmeyin veya sokmayın.
- Cihaz düzgün çalışmıyorsa, düşürülmüş, hasar görmüş veya suya düşmüşse ürünü kesinlikle kullanmayın.
- Kırıldıysa veya herhangi bir parçası eksikse ürünü kullanmayın.
- Aerosol sprey ürünlerinin kullanıldığı veya oksijen verilen yerlerde ürünü çalıştırmayın.
- Onarımlar yalnızca yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Cihazda hiçbir değişiklik yapılmasına izin verilmez ve yapılan herhangi bir değişiklik garantiyi geçersiz kılar.
- Cihazın kablolarını ısıtılmış / sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Ambalaj üzerindeki hijyen bandı bozulmuş ise kullanmayın.
- Şarj kablolarının kabloları gevşer, ayrılır veya yıpranırsa şarj kablolarını kullanmayı derhal bırakın.
- Pompa ünitesinden veya şarj kablolarından duman geldiğini veya bunların yandığını fark ederseniz cihazı kullanmaya derhal son verin.
- Uçuş sırasında kullanılması amaçlanmamıştır.

Dikkat

- İşlem sırasında göğsünüzde veya meme ucunuzda ağrı hissederseniz, pompayı kapatın veya parmağınızı göğüs flanşı ile göğsünüz arasına sokarak emmeyi derhal sonlandırın. Tahriş veya rahatsızlık meydana gelirse, cihazı kullanmayı bırakın ve bir doktora başvurun. Pompa kullanımı sırasında Giyilebilir Pompadan aşırı sıcaklık geldiğini hissederseniz, pompayı kullanmayı hemen durdurun ve pompayı çıkarın.


Bu Talimatları ileride başvurmak üzere faturanızla birlikte saklayın.

İÇİNDEKİLER

1. Lansinoh® Gen1 Giyilebilir Göğüs Pompası Parçaları.....	2
2. Gen1 Giyilebilir Göğüs Pompasının Hazırlanması.....	2
3. Lansinoh® Gen1 Giyilebilir Göğüs Pompasının Takılması	4
4. Doğru Göğüs Yastığı Uyumunu Bulmak	5
5. Pompa Kontrolleri.....	6
6. Sağım Sonrasında	8
7. Her Kullanım Sonrası Temizlik.....	9
8. Şarj Etme.....	9
9. Anne Sütü Saklama Kılavuzu.....	10
10. Sorun Giderme	11
11. Teknik Bilgiler	12
12. Garanti	13

1. Lansinoh® Gen1 Giyilebilir Göğüs Pompası Parçaları

Kutudaki parçalar

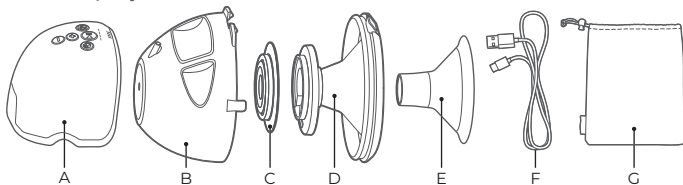

GIYİLEBİLİR POMPA PARÇALARI VE AKSESUARLAR		MADDE NUMARASI
A	Pompa Motoru (x1)	—
B	240 ml Süt Toplama Şişesi (x1)	53667
C	Diyafram (x1)	53557
D	30,5 mm Göğüs Yastığı (x1)	53672
E	21 mm Silikon Uç Ek Parçası (x1)	53553
	25 mm Silikon Uç Ek Parçası (x1)	53671
F	USB-C Şarj Kablosu (x1)	—
G	Taşıma Çantası (x1)	—

2. Gen1 Giyilebilir Göğüs Pompasının Hazırlanması

Lansinoh® Gen1 Giyilebilir Göğüs Pompasını ilk kez kullanmadan önce şarj etmeniz gerekmektedir. Şarj ve pil detayları için Bölüm 8'e bakın.


İlk Kullanım Öncesinde

Giyilebilir Pompayı sökün ve ilk kullanımdan önce Pompa Kabı parçalarını temizleyerek dezenfekte edin.

Sökme

1. Pompa motorunun yan kısmını tutun ve çekerek Pompa Kabından çıkarın. Pompanın motorunu bir kenara koyun.
2. Silikon uç parçasını göğüs yastığından çıkarın.

3. Süt toplama şişesini göğüs yastığından çıkarın. İki parçayı ayırmak için şişedeki tırnakları aşağı doğru bastırırken, göğüs yastığındaki dökme ağzını yukarı doğru itin.
4. Diyaframı göğüs yastığından çıkarın.

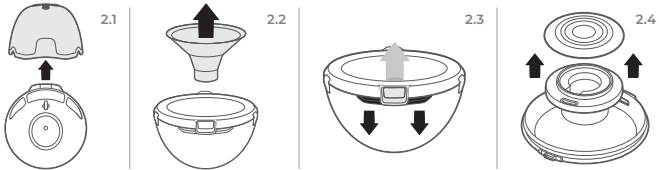

Temizlik ve Dezenfeksiyon

1. Giyilebilir pompayı kullanmadan önce mutlaka ellerinizi sabun ve suyla iyice yıkayıp kurulayın.
2. Pompa Kaplarını parçalara ayırın ve tüm parçaları büyük bir tencereye koyun. Pompa motoru kesinlikle yıkanmamalı veya suya daldırılmamalıdır. Pompa motorunu, tuş takımını ve pompanın yerleştirildiği yüzeyi Etil veya İzopropil alkol (%70 - %90) gibi düşük seviyeli bir dezenfektanla silin.
3. Tüm parçaların tencerede serbestçe hareket edebilmesi için yeterli yer bulunduğundan emin olun ve tencereyi parçaların üzerini örtecek kadar suyla doldurun.
4. Suyu kaynatın ve tüm parçaları 5 dakika boyunca kaynayan suda bekletin.
5. Kaynattıktan sonra parçaları bir maşayla tencereden çıkarın ve kuruması için temiz bir havlu üzerine koyun, parçaların üzerini ikinci bir havluyla örtün.
6. Montaj ve kullanımdan önce parçaların tamamen kurumasını bekleyin. Kısmen ıslak kalan parçalar pompanın işlevselliğini etkileyebilir veya parçaların bozulmasına neden olabilir.
7. Parçalar kuruduktan sonra kapaklı temiz bir plastik kaptaki veya temiz bir fermuarlı plastik torbada saklanabilir. Parçaları tamamen kurumadan bir kap veya torba içine yerleştirmeyin.

Pompa motorunu DURULAMAYIN veya SUYA DALDIRMAYIN. Zarar görmemesi için kuru tutulması gerekir.

Her Kullanımdan Önce

1. Giyilebilir pompayı kullanmadan önce mutlaka ellerinizi sabun ve suyla iyice yıkayıp kurulayın.
2. Pompa Kaplarını monte etmeden önce tüm parçaların tamamen kuru olduğundan emin olun.
3. Bileşenleri tek tek çatlak, çentik, yırtık, renk değişikliği veya bozulma açısından inceleyin. Bunlar pompanın işlevselliğini etkileyebilir.

4. Parçalarınızla ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz olursa daha fazla bilgi almak için lütfen **+90 216 527 09 05** numaralı telefondan Lansinoh® Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.


UYARI: Bu kullanım kılavuzunda belirtilen temizlik yöntemleri dışında herhangi bir temizlik yönteminin kullanılmaması şiddetle tavsiye edilir.

3. Lansinoh® Gen1 Giyilebilir Göğüs Pompasının Takılması

Kurulum

Giyilebilir Pompayı monte etmeden önce mutlaka ellerinizi yıkayın.

1. Diyaframı 30,5 mm göğüs yastığının diskine yerleştirin. Parçalar arasında boşluk kalmamasına dikkat edin.
2. 8 oz/240 ml ölçüm işaretlemesinin yakınındaki göğüs yastığı alt tırnağını bulun. Göğüs yastığının alt tırnağını süt toplama şişesinin alt yuvasına yerleştirin.
3. Süt toplama şişesinin ve göğüs yastığının üst kısmındaki tırnakları hizalayın, ardından tık sesi duyana kadar parçaları sıkıca birbirine bastırın. Sıkı bir şekilde kapanmasını sağlamak için kabın etrafındaki kenarlara bastırın ve boşluk kalmamasına dikkat edin.

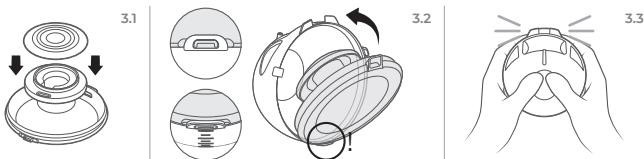

4. Gerekirse: 25 mm veya 21 mm silikon uç ek parçasını 30,5 mm göğüs yastığına yerleştirin. Göğüs yastığı uyumuna ilişkin rehberlik için bölüm 4'e bakın.
5. Emme kaybını önlemek için tüm bağlantıların güvenli ve sıkı olduğundan emin olun.
6. Pompa motorunu süt toplama şişesine takmak için, göğüs yastığının dökme ağzını pompa motorunun altındaki çentiğe yerleştirin. Dökme ağzının kapalı olduğundan emin olun ve pompa süt toplama şişesini motora bastırın.



Not: Tamamen monte edildikten sonra Giyilebilir Pompayı sütyeninizin içine yerleştirin ve pompayı çalıştırmadan önce göğüs ucunuzu ortalayın.


4. Doğru Göğüs Yastığı Uyumunu Bulmak

Güvenli ve konforlu bir pompa kullanım deneyimi için doğru göğüs ucu boyutunu kullanmak ve göğüs yastığı ile doğru hizalama yapmak, göğüs ucunda oluşabilecek olası hasarı azaltmak ve süt veriminizi artırmak açısından önemlidir.

Göğüs Yastığı Uyum


Doğru uyumu bulmak için areolayı değil, göğüs ucunu ölçün. Göğüs ucunuzdan bir beden büyük olan göğüs yastığını veya silikon uç ek parçasını seçin.

Göğüs yastığını göğüsünüze doğru tutun, her bir göğüs ucunuzun ortasına yerleştirin ve göğüs ucunun göğüs yastığına rahatça oturup oturmadığına bakın. Eğer göğüs ucu tünelin kenarlarına değiyorsa bir üst bedeni, eğer göğüs ucu etrafında çok fazla boşluk varsa bir alt bedeni denemek isteyebilirsiniz.

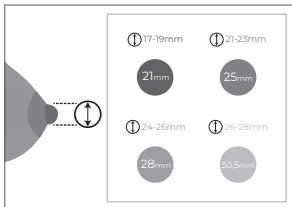

Doğru göğüs yastığını bulduğunuzu gösteren işaretler:

- Pompa kullanımı sırasında sadece göğüs ucunuz ve areolanızın bir kısmı tünele girer.
- Pompa kullanımı sırasında göğüs ucunuz tünel içerisinde sürtünmeden serbestçe hareket eder.
- Pompa kullanımı sonrasında göğüslerinizin daha yumuşak ve hafif bir his verdiğini fark edeceksiniz.
- Anne sütü miktarınız artar veya sabit kalır.

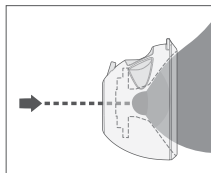

Göğüs ucu büyüklüğü ve şekli zamanla veya pompa kullanım oturumu sırasında bile değişebilir. İki göğüste farklı boyutta parçalar kullanılması gerekebilir. Konforu ve süt sağımını en üst düzeye çıkarmak için göğüs yastığınızın uyumunu düzenli olarak kontrol edin. Daha fazla bilgi için Lansinoh.com.tr adresini ziyaret edin.

Silikon Uç Parçalarının Eklenmesi

Lansinoh® Geni Giyilebilir Göğüs Pompası, uyumlu 25 mm ve 21 mm silikon uç ek parçalarına sahip 30,5 mm'lik bir göğüs yastığı içerir. 30,5 mm'lik göğüs yastığı tek başına veya doğru uyumu bulmak için silikon uç ekleriyle birlikte kullanılabilir.


Silikon uç boyutunuz 25 mm veya 21 mm ise, 30,5 mm göğüs yastığına karşılık gelen silikon uç ek parçasını güvenli bir şekilde oturma kadar yerleştirin. Silikon uç parçasını çıkarmak için, ek parçanın kenarını yavaşça kaldırın ve göğüs yastığından dışarı doğru çekin.

Etkili Pompa Kullanım Pozisyonu

Dik pozisyonunda, oturarak veya ayakta pompa ile sağım yapabilirsiniz. Konfor ve performans için göğüs ucunun doğru hizalamasını korumak çok önemlidir. Doğru sıkıştırmayı elde etmek ve etkili bir pompa sağım deneyimi sağlamak için pompayı sütyeninizin içinde gerektiği gibi ayarlayabilirsiniz. Kullanım sırasında doğru yönelimin muhafaza edilmesi için pompayı yatarken veya uyurken kullanmayın.

5. Pompa Kontrolleri

- A. Güç – Aç/Kapat/Duraklat/Başlat
- B. Emme Seviyesi Kontrol Düğmeleri
- C. Uyarı/Sağım Aşamaları Geçiş Düğmesi
- D. Emme Seviyesi Gösterge Işıkları – 1'den 8'e
- E. Sağım Stili Geçiş Düğmesi
- F. Pil Seviyesi Gösterge Işıkları

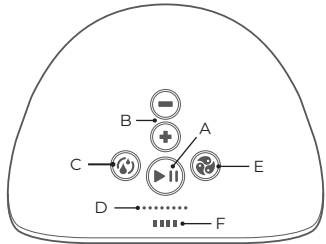

Oturumu Başlatma, Durdurma/ Devam Ettirme ve Bitirme

- Giyilebilir Pompayı sütyeninize yerleştirdikten sonra güç düğmesine basın (A). Pompa, uyarı aşamasında otomatik olarak sağıma başlayacak ve kontrolleri 15 saniye boyunca aydınlatacaktır.
- 15 saniyelik hareketsizlikten sonra ışıklar söner ve kontroller, kazara ayar değişikliklerinin yapılmasını önlemek için kilitlenecektir.
- Kontrolleri açmak için herhangi bir düğmeye basın, kontrollerin ışığı yanar.
- Herhangi bir nedenle sağım oturumunu duraklatmak için, gerekirse kontrollerin kilidini açın ve ardından güç düğmesine basın. Oturum duraklatılır.
- Sağım oturumuna devam etmek için gerekirse kontrollerin kilidini açın ve güç düğmesine tekrar basın. Oturum devam eder.
- Sağım oturumunu tamamlamak için gerekirse kontrollerin kilidini açın ve pompa kapanana kadar güç düğmesini basılı tutun.
- Pompayı göğsünüzden çıkarmadan önce göğüs ucunda emme yapılmadığından emin olun. Gerekirse, göğüs yastığı ile göğsünüz arasına parmağınızı sokarak emmeyi durdurun. Emme sonlandırıldığında pompa güvenli bir şekilde çıkarılabilir.

Not: Pompa 60 dakikadan uzun süre açık kalırsa ve gözetimsiz bırakılırsa otomatik olarak kapatılır. Pompayı tekrar çalıştırmak için güç düğmesine basın.

Fazlar

Gen1 Giyilebilir Göğüs Pompasının iki fazı vardır: Uyarı ve Sağım.

- Giyilebilir Pompa uyarı fazında başlatılır ve 2 dakika sonra otomatik olarak sağım fazına geçer.
- Önceden ayarlanmış 2 dakikalık uyarı fazını atlamayı tercih ettiğiniz durumda, gerekirse kontrollerin kilidini açmanız ve ardından uyarı ve sağım değiştirme düğmesine basmanız gerekir . Pompa, sağım fazına geçer.
- Uyarı fazında, uyarı ve sağım değiştirme düğmesinin arka ışığı yanar. Sağım fazında, sağım stili geçiş düğmesi, mevcut sağım stilini belirtmek için arkadan aydınlatılacaktır. Emme seviyesi gösterge ışıkları mevcut emme seviyesine karşılık gelecektir.

Not: Pompayı ilk kez çalıştırdığınızda, emme seviyesi 5 olan uyarı fazında çalışmaya başlar.

Ayarlanabilir emme seviyeleri

Giyilebilir pompa, uyarı fazında ve sağım fazında sizin için en iyi sonucu veren ayarı kontrol etmenizi sağlar. Sekiz emme gücü kademesi arasından seçim yapabilirsiniz. Tercih ettiğiniz ayarı bulmak için emme seviyesi kontrol düğmelerine basın.

- Giyilebilir Pompada emme seviyesi gösterge ışıkları bulunur. Emme seviyesi gösterge ışıkları, mevcut emme seviyesini göstermek için yanacaktır. Bir ışık pompanın emme gücü 1'de olduğunu gösterir, 8 ışığın da yanması pompanın en yüksek emme gücünde olduğu anlamına gelir.
- Pompa daha yüksek bir emme seviyesine geçtiğinde hedeflenen seviye yanıp söner ve pompa hedeflenen seviyeye ulaşılan kadar emme gücünü yavaşça artırır. Hedef seviyeye ulaşıldığında ışığın yanıp sönmeyeceği duracaktır.
- Emme gücünü artırmak veya azaltmak için emme seviyesi kontrol düğmelerine basın.

Not: Sağımın rahat olması gerekir. Eğer herhangi bir zamanda göğsünüzdeki emme hissi rahatsız edici seviyelere ulaşırsa, emme seviyesini azaltın. Emme gücünü konforlu seviyenin üzerine çıkarmayın.

Sağım Stilleri (Sağım Fazında)

Giyilebilir Pompa, bebeğin beslenme düzenini taklit eden sağım aşamasında üç farklı özelleştirilebilir sağım stili sunar. Özellikler, en iyi sonuçları elde etmek için ayarlamalar yapmanıza olanak tanır.

- Kontrollerin kilidini açtıktan sonra, sizin için en rahat ve etkili stili seçmek için sağım stilleri geçiş düğmesine basın .
- Sağım stilini değiştirmek için düğmeye tekrar basın. İki göğüste farklı stilleri kullanmanız gerekebilir.

Not: Pompa ilk defa sağıım aşamasına geçtiğinde, 2. sağıım stilinde ve 3. emme seviyesinde çalışmaya başlayacaktır.

	Sağıım Stili 1	
	Sağıım Stili 2	
	Sağıım Stili 3	


Bellek Fonksiyonu

Genl Giyilebilir Göğüs Pompası, her aşama için son emme seviyesini ve sağıım aşaması için kullanılan son sağıım stilini otomatik olarak kaydeder. Pompa, sağıım aşamasına girdiğinde, konforlu bir sağıım deneyimi yaratmak için en son sağıım oturumunda kullanılan sağıım stiline ve emme seviyesi ayarlarına kademeli olarak geçiş yapacaktır.

Not: Her iki pompa için de farklı ayarlar kullanılıyorsa, en iyi sonucu elde etmek için lütfen bir göğüste aynı pompayı kullanın.

6. Sağıım Sonrasında

1. Oturum bittikten sonra pompa kapanana kadar güç düğmesini basılı tutun.
2. Pompayı dikkatlice sütyeninizden çıkarın. Pompayı dik tutun ve pompa motorunu Pompa Süt Toplama Şişesinden dikkatlice çıkarın.
3. Pompa Süt Toplama Şişesini, göğüs kenarı yukarı bakacak şekilde temiz ve sabit bir yüzeye yerleştirin.

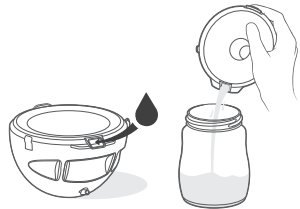

Sütün aktarılması

Anne sütünü biberona veya süt saklama poşetine aktarmak için dökme ağzını kullanın. Anne sütünü dikkatlice seçtiğiniz saklama kabına boşaltın.

7. Her Kullanım Sonrası Temizlik

Pompa Süt Toplama Şişesini sökün. Pompa motorunu **YIKAMAYIN**. Pompa motoru kuru tutulmalı ve hiçbir zaman suyla durulanmamalı veya suya yatırılmamalıdır. Pompa motorunu, tuş takımını ve pompanın yerleştirildiği yüzeyi Etil veya İzopropil alkol (%70 - %90) gibi düşük seviyeli bir dezenfektanla silin.

1. Her kullanımdan sonra pompa süt toplama şişesinin tüm parçalarını hemen soğuk suyla durulayın. Parçaları yalnızca bebek besleme ekipmanlarının yıkanması için kullanılan temiz bir kaba yerleştirin. Parçaları doğrudan lavaboya koymayın. Lavabonun içindeki veya giderdeki mikroplar parçaları kirletebilir.
2. Parçaları ılık sabunlu suyla elde yıkayın. Sert plastik kısımları fırçalamak için emzik fırçası kullanılabilir.
3. Parçaları akan temiz, ılık suyla veya yalnızca bebek besleme malzemelerini temizlemek için kullanılan ayrı bir kap içinde temiz suya batırarak durulayın.
4. Parçaları kir ve tozdan korunan bir alanda temiz, kullanılmamış bir bulaşık havlusu veya kağıt havlu üzerine yerleştirin. Parçaları ovma veya kurulum için bulaşık havlusu kullanmayın. Montaj ve kullanımdan önce parçaların tamamen kurummasını bekleyin. Kısmen ıslak kalan parçalar pompanın işlevselliğini etkileyebilir veya parçaların bozulmasına neden olabilir. Parçalar kuruduktan sonra kapaklı temiz bir plastik kapta veya temiz bir fermuarlı plastik torbada saklanabilir. Parçaları tamamen kurumadan bir kap veya torba içine yerleştirmeyin.
5. Her kullanımdan sonra yıkama kabını ve emzik fırçasını üreticinin temizlik önerilerine uygun şekilde temizleyin. Bunları her kullanımdan sonra iyice durulayın ve açık havada kurumaya bırakın.

Bölüm 2'deki Temizlik ve Dezenfeksiyon adımlarına bakın.

8. Şarj Etme

Pil seviyesi gösterge ışıkları pompanın kalan çalışma süresini gösterir. Pil zayıfladığında kırmızı bir çubuk yanar. Kırmızı ışık yanıyorsa hemen şarj edin.

- Bir oturumu başlatmadan önce en azından bir sabit yeşil çubuğun yandığından emin olmak için pil ömrünü takip edin.
- Şarj işlemi devam ederken yeşil pil ışıkları yanıp söner. Şarj sırasında pompa açık duruma **GETİRİLEMEZ**.
- Giyilebilir Pompa ile birlikte verilen şarj kablosu kullanılarak pilin tamamen şarj edilmesi yaklaşık 4 saat sürer.
- Giyilebilir Pompa ile birlikte verilen şarj kablolarıyla birlikte sertifikalı 5V 1A USB-A-C güç kaynaklarını kullanın.
- Pompa tam şarj olduğunda, pil ışıkları 4 yeşil çubukla yanar.

ŞARJ EDİLEBİLİR PİL: 3,8 V, 1300 MAH, LİTYUM İYON

	4 yeşil çubuk	Yaklaşık 8 oturum için yeterli şarj
	3 yeşil çubuk	Yaklaşık 6 oturum için yeterli şarj
	2 yeşil çubuk	Yaklaşık 4 oturum için yeterli şarj
	1 yeşil çubuk	Bir tam sağımlı oturumu için yeterli şarj
	1 kırmızı çubuk	Pil zayıf, sağımlı oturumu için yetersiz şarj
	Yanıp sönen kırmızı ışık	Pompa kapatılacak

*Bir oturumun süresi yaklaşık 15-20 dakikadır ancak bu süre kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.

9. Anne Sütü Saklama Kuralları

Zamanında Doğan Sağlıklı Bebekler İçin Anne Sütünü Saklama ve Çözdürme Kuralları

Özel saklama talimatları için sağlık hizmetleri sağlayıcınıza veya Uluslararası Kurul Sertifikalı Emzirme Danışmanına başvurun. Sütü dondururken, dondurucunun arka tarafında saklayın ve kapağın açılıp kapanmasıyla sıcaklık değişebileceğinden sütü dondurucu kapağında muhafaza etmeyin.

Sağlıklı, zamanında doğmuş bebeklerde kullanılmak üzere taze anne sütünün saklanması için kılavuz

YER	SICAKLIK	NE KADAR SÜRE	BİLİNMESİ GEREKENLER
Tezgah, masa	Oda sıcaklığı (16°C - 29°C 'ye kadar), serin ve loş ortamda	4 saate kadar	Kapların mümkün olduğunca kapalı ve serin tutulması gerekir. Kabi temiz, soğutulmuş bir havluyla örtmek sütün soğuk tutulmasını sağlayabilir. Bebeğin beslenmesi bittikten sonra kalan sütü 2 saat içinde atın.
Buzdolabı	+4°C	4 güne kadar	Sütü buzdolabının arka kısmında saklayın. İş yerindeyken anne sütünü ortak kullanıma açık buzdolabına koymanızda bir sakınca yoktur. Anne sütünüzü açığa etiketlediğinizden emin olun.
Dondurucu	-18°C veya daha soğuk	6 aya kadar saklanabilir.	Sütü dondurucunun arka tarafında, sıcaklığın en sabit olduğu yerde saklayın. -18°C (0°F) veya daha soğukta saklanan süt daha uzun süre kullanımı güvenli durumda kalır ancak sütün kalitesi o kadar yüksek olmayabilir.

Kaynak: T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü "Anne Sütü Saklama Koşulları" (2025).

Tüm anne sütlerinin üzerine tarihi not edin ve ilk önce en eski tarihli anne sütünü kullanın.

NOT: Sütü çözdürdükten sonra tekrar DONDURMAYIN.

Donmuş sütü çözme işlemi

Donmuş sütü buzdolabında ya da sütün saklandığı torbaları bir kap içinde soğuk suyun altına tutarak ve su sıcaklığını yavaş yavaş artırarak çözebilirsiniz. Çözülen süt 24 saat boyunca buzdolabında saklanabilir.

Anne sütü homojen değildir ve bekledikçe ayrışma olduğunu fark edebilirsiniz. Ayrılan katmanları karıştırmak için bebeği beslemeden önce çözölmüş sütü yavaşça karıştırın. Anne sütü, günün hangi saatinde sağıldığına, tüketilen yiyeceklerle ve bebeğin yaşına bağlı olarak renk ve kıvam açısından farklılıklar gösterebilir.

NOT: ANNE SÜTÜNÜ MİKRODALGA FIRINA KOYMAYIN! Mikrodalga fırın, sütün bileşimini değiştirir. Mikrodalga fırın aynı zamanda sütte bebeği yakabilecek “sıcak noktalar” oluşturabilir.

10. Sorun Giderme

Pompada güç yok

- Pil boşalmış. Verilen USB-C kablosunu kullanarak Giyilebilir Pompayı bir USB güç kaynağına bağlayın ve pompayı 4 saat boyunca şarj edin.
- Pompa hala çalışmıyorsa lütfen **+90 216 527 09 05** numaralı telefonu arayarak veya **infotr@lansinoh.com.tr** adresine e-posta göndererek Lansinoh® Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Elektrik hizmetinde kesinti

Pompanın elektriksel ve/veya mekanik işlevinin normal çalışmasında bir kesinti yaşarsanız.

- Pilin düzgün şekilde şarj edildiğinden emin olun.
- Pompa kapanıyorsa ve pil şarj edilmiş durumdaysa, lütfen **+90 216 527 09 05** numaralı telefonu arayarak veya **infotr@lansinoh.com.tr** adresine e-posta göndererek Lansinoh® Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

11. Teknik Bilgiler

Güç Kaynağı

- **Pil ile Çalıştırma:** Yeniden şarj edilebilir Lityum İyon pil (3,8 V, 1300 mAh)
- **Çalışma süresi:** Pompa maksimum ayarlarda çalışırken maksimum 3 saat. Sonuçlar pilin ne kadar yeni olduğuna ve pompa ayarlarına bağlıdır. Pompanın beklenen kullanım ömrü 500 saattir.
- **Pompa güç tüketimi:** Maksimum 3 Watt
- **Gerilim regülasyonu:** Kısa devre korumalı anahtarlama gerilim regülatörü

Kontrol Sistemi

- **Kontrol Ünitesi:** Entegre program bellekli mikro denetleyici
- **Program belleği:** 128K flash ROM, 8K RAM bellek
- **Tek kontrol:** Pompa başına tek göğüs sağımı
- **Seçilebilir sağım fazı ve stili:** 2 sağım fazı ve 3 sağım stili, pompadaki düğmelerden seçilebilir ve kontrol edilebilir
- **Ayarlanabilir emme seviyesi:** 8 emme seviyesi seçilebilir ve düğmelerle kontrol edilebilir
- **Emme vakum seviyesi (Sağım/Çiftli pompalama):** Minimum 100 mmHg, Maksimum 280 mmHg

Lityum Pil

Cihazda kullanılan pil, uygun şekilde kullanılmadığı takdirde yangın veya kimyasal yanık riski oluşturabilir.

Pili parçalarına ayırmayın, ısıtmayın, yakmayın veya ateşe atmayın. Pili yerel düzenlemelere uygun olarak atın.

12. Garanti

Sınırlı Tüketim Mali Garantisi

Pompa mekanizması ve diğer ürün bileşenleri için satın alma tarihinden itibaren iki yıl olmak üzere bu üründe ticari olarak kabul edilebilir olmayan materyal ve işçilik kusurları olmadığına dair ilk alıcıya ("alıcı") garanti verilmiştir. Bu ürünü başka birine satar veya verirsiniz, garanti iptal olmaktadır. Bu garanti size belirli yasal haklar sağlamaktadır ve bulunduğunuz yere göre değişen başka haklara sahip olabilirsiniz.

LANSINOH® BURADA AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA ÜRÜNLE İLGİLİ HERHANGİ BİR AÇIK GARANTİ VERMEMEKTEDİR. TİCARİ ELVERİŞLİLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞA İLİŞKİN HERHANGİ BİR ZİMNİ GARANTİ DAHİL OLMAK KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE HER TÜRLÜ ZİMNİ GARANTİNİN SÜRESİ İLK ALICI TARAFINDAN SATIN ALINAN TARİHTEN İTİBAREN 2 YIL İLE SINIRLI OLACAKTIR.

Lansinoh® tarafından ürünün yukarıdaki sınırlı garantiyi karşılamadığı saptanırsa, alıcının tek ve münhasır yasal çaresi olarak, Lansinoh® kendi tercihiyle bağlı olarak bu ürünü tamir edecek veya yenisiyle değiştirecek ve bu değişim, parçalar veya işçilik için ücret almayacaktır.

NOT: Ürünün Lansinoh®'a iade masraflarını alıcı karşılayacaktır. Bu garanti yanlış kullanılmış veya değiştirilmiş ürünler için geçerli değildir. Lansinoh® emzirme ürünleriyle sadece Lansinoh® marka yedek parçaların kullanılması önerilmektedir. Yanlış yapılan bakım veya tamir veya Lansinoh® markası dışında yedek parçaların kullanımı bu garantiyi geçersiz kılmaktadır.

KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, LANSINOH® YAZILI VEYA ZİMNİ GARANTİNİN İHLALİNDEN DOĞAN DEĞİŞİM MALİYETLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HİÇBİR ARIZİ VEYA DOLAYLI HASARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Bu garanti kapsamında herhangi bir talepte bulunmak isterseniz Türkiye'de yaşıyorsanız **+90 216 527 09 05** nolu telefondan bize ulaşabilir veya Türkiye dışında yaşıyorsanız, ülkenizdeki distribütörle irtibat kurabilirsiniz. Size gerektiği takdirde orijinal tarihin yazılı olduğu fatura veya üzerinde tarih olan başka bir satın alma belgesi ve sorunun kısa açıklamasıyla birlikte ürünü geri göndereceğiniz bir ücretsiz posta adresi verilecektir.

Lansinoh Laboratories Inc.Delaware Türkiye İstanbul Şubesi
Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:7, A+Live Ataşehir Plaza,
1. Bodrum Kat, İç Kapı No:25, 34758 Ataşehir/İstanbul/Türkiye
TEL: +90 216 527 09 05/06/08 | Lansinoh.com.tr

Lansinoh, Lansinoh Laboratories Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır.
© 2025 Lansinoh Laboratories Inc. Tüm hakları saklıdır.
Türkiye'de basılmıştır.

 Lansinoh® Laboratories Sağlık Gereçleri Tasarım San. Tic. Ltd. Sti.
Zafer SB Mah. Gunduz Sk. No:13 E.S.B Gaziemir/ İzmir/ Türkiye

